


საწველის თავაკის სწორი ზომის შერჩევა

გაზომვამდე 10 წუთის განმავლობაში გამოიყენე საწველი ან აწოვე ბავშვს ძუძუ, ან გაზომე მანამდე და დაუმატე ზომას 2-3 მმ.

გაზომვისას მოათავსეთ ძუძუს თავის ბაზა იმ წრედში რომელიც ყველაზე მჭიდროდ, მაგრამ შეხების გარეშე, ერგება. (ჩაბრუნებული ძუძუს თავები უნდა გაიზომოს 10 წუთი წოვის/წველის შემდეგ)

ძუძუს თავები ხშირად არ არის იდენტური ამიტომ გაზომე თითო მხარე ცალ-ცალკე

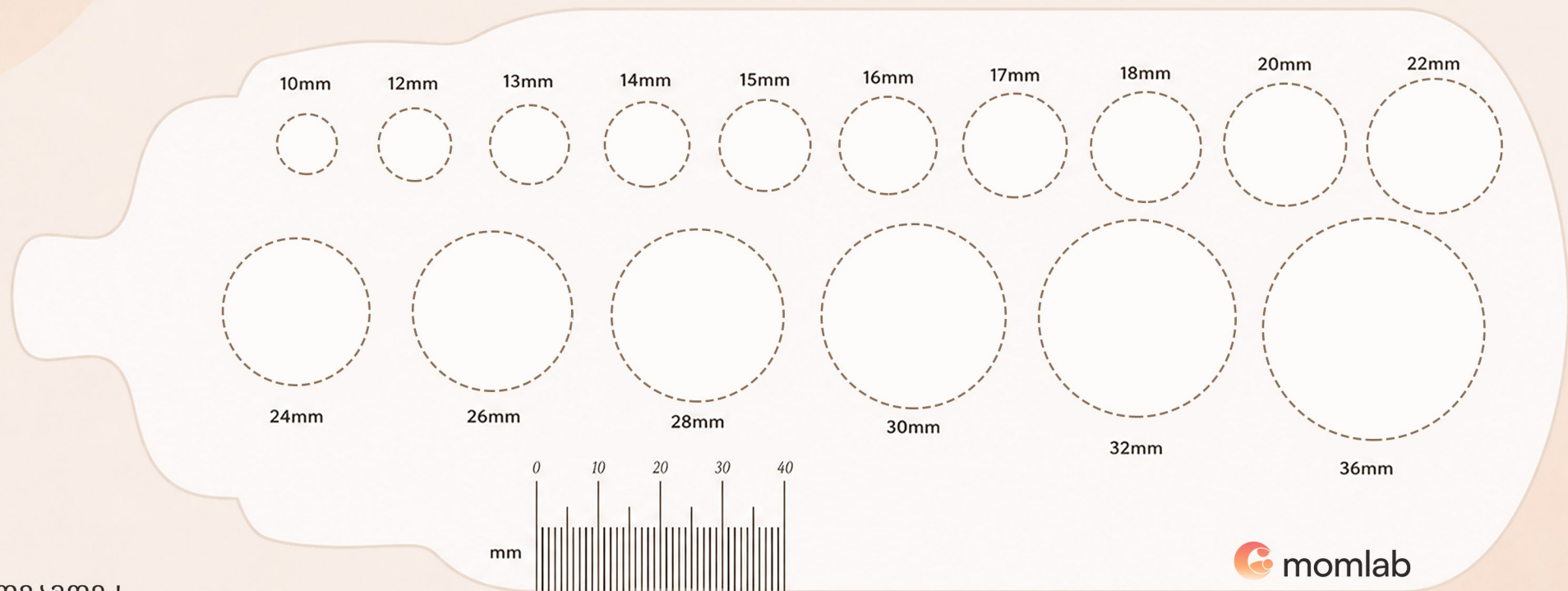

 momlab

ბეჭდვამდე !

- დაბეჭდე 100% მასშტაბით (Actual Size).
- არ გამოიყენო Fit to Page ან სხვა მასშტაბირების რეჟიმი.
- გადაამოწმე საკონტროლო სახაზავი დაბეჭდვის შემდეგ.

 momlab